




IMBRAGATURA MEZZO CORPO

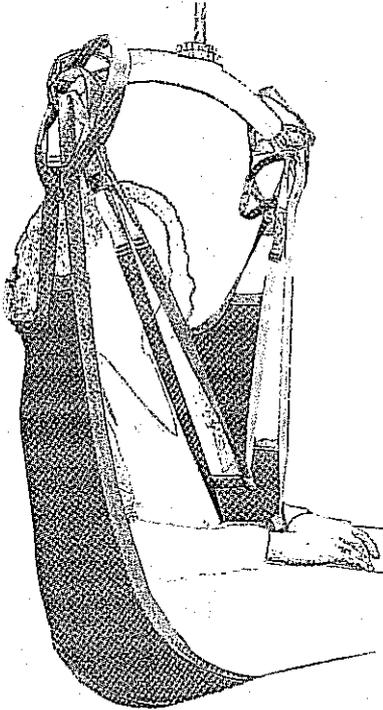

L'imbragatura mezzo corpo MTH-IMC è il modello più utilizzato che permette il trasferimento mantenendo una posizione seduta, posizione particolarmente indicata per la movimentazione dal letto alla carrozzina e viceversa. Grazie allo schienale imbottito e rinforzato la movimentazione risulta estremamente confortevole.

Le braccia del paziente vanno mantenute all'interno dell'imbragatura.

E' disponibile in diverse taglie, da scegliere in base al peso e alla corporatura del paziente.

E' importante identificare la taglia corretta per garantire il massimo comfort e sicurezza.

Realizzata con tessuto morbido ad alto scorrimento per semplificare il posizionamento e la rimozione dell'imbragatura. Non è concepita per essere lasciata sotto il paziente

Destinazione d'uso: sollevamento di persone disabili. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio. Si declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

IMPORTANTE

Leggere le istruzioni per l'uso presenti in questo manuale prima di utilizzare l'imbragatura.

Fare sempre riferimento anche al manuale del sollevatore che si utilizza

Non superare la portata massima indicata sull'etichetta. Nel caso in cui il sollevatore utilizzato riporti un carico massimo diverso da quello dell'imbragatura, fare sempre riferimento al carico massimo più basso fra i due.

Imbragatura adatta ad essere utilizzata sia su sollevatori fissi che mobili, dotati di bilancini a 2, 3 o 4 punti di aggancio.

Utilizzare solo su sollevatori che prevedono agganci ad asola (No clip o altro tipo di aggancio)

Il sollevamento e la movimentazione di una persona implicano sempre un certo rischio.

Accertarsi sempre di utilizzare il dispositivo di sollevamento corretto e eventuali accessori adeguati.

Durante l'utilizzo procedere sempre con la massima attenzione.

Gli operatori sono responsabili della sicurezza della persona sollevata e devono valutare la capacità del paziente di affrontare il sollevamento.

GUIDA AL POSIZIONAMENTO DELL'IMBRAGATURA

SOLLEVAMENTO DA POSIZIONE SEDUTA




Posizionare l'imbragatura dietro la schiena del paziente, in modo che l'etichetta rimanga in alto e rivolta verso l'esterno.


L'estremità inferiore dell'imbragatura deve essere posizionata all'altezza del cocchige, mentre la parte superiore dell'imbragatura deve essere a livello delle spalle.

Lo schienale imbottito e rigido facilita il posizionamento.

Se il paziente è collaborante, può aiutare piegandosi leggermente in avanti.

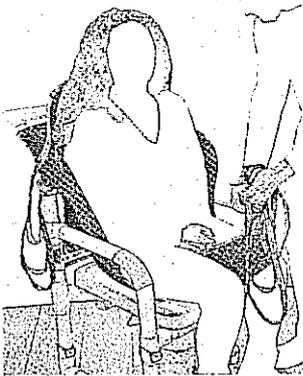


Tirare i supporti imbottiti delle gambe in avanti, esternamente rispetto alle cosce ed infilarli sotto le rispettive cosce. Con una mano afferrare la cima del supporto gambe (internamente rispetto alla coscia) e con l'altra tenere in posizione la gamba. Tirare in modo che il supporto imbottito scorra sotto la coscia fino a fuoriuscire di almeno 20 cm senza creare pieghe. Ripetere l'operazione per l'altra gamba. In caso servisse un contenimento maggiore, è possibile far passare entrambi i supporti imbottiti sotto entrambe le gambe

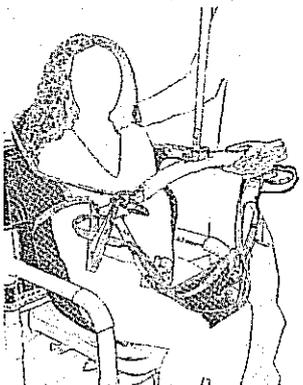

Agganciare l'imbragatura al bilancino del sollevatore utilizzando le asole colorate per gestire l'inclinazione. Utilizzare lo stesso colore per zona [ad esempio rosso per le spalle e giallo per le gambe]. Durante l'aggancio dell'imbragatura, tenere bilancino e sollevatore lontano dalla testa del paziente.

L'imbragatura è applicabile a bilancini da 2 a 4 punti di aggancio. Consultare il manuale del sollevatore per verificarne la compatibilità e la procedura di aggancio.

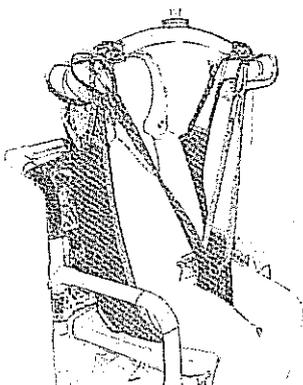

Sollevarlo quindi il paziente quanto basta per effettuare la movimentazione.

Utilizzare la maniglia posta nella parte esterna dello schienale per posizionare meglio il paziente in posizione seduta.

Completato il trasferimento, rimuovere l'imbragatura partendo dai supporti imbottiti delle gambe passando poi allo schienale. Il tessuto è realizzato per permettere un facile scorrimento.

SOLLEVAMENTO DA POSIZIONE SUPINA

L'imbragatura può essere posizionata in due modi a seconda della tipologia di letto:


A. Letto dotato di movimentazione separata delle sezioni

B. Letto tradizionale

A. Letto dotato di movimentazione separata delle sezioni

Alzare lo schienale del letto per posizionare il paziente il più possibile con la schiena verticale. fare riferimento alla procedura utilizzata dalla posizione seduta.

B. Letto tradizionale

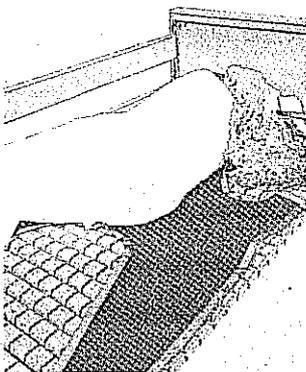


Girare il paziente su un fianco.

Posizionare l'imbragatura distesa, con l'etichetta rivolta verso l'esterno.


Assicurarsi che il bordo inferiore rimanga all'altezza del coccige e il bordo superiore all'altezza delle spalle.

Girare il paziente sull'altro fianco per distendere completamente l'imbragatura.

Lo schienale imbottito deve essere centrato rispetto alla schiena.

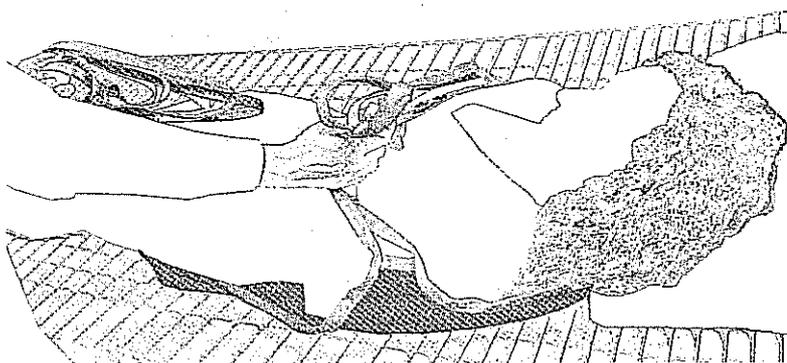

Posizionare ciascun supporto imbottito sotto la rispettiva gamba.

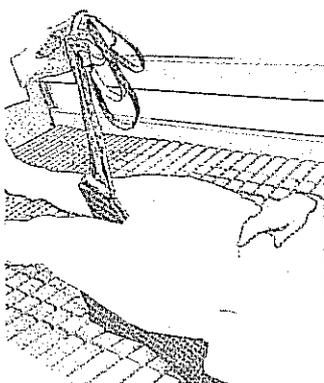

Tirare in modo che il supporto imbottito scorra sotto la coscia fino a fuoriuscire di almeno 20 cm.

E' importante che il supporto avvolga la coscia senza creare pieghe che provocherebbero dolore durante il sollevamento.

Eseguire la stessa operazione anche per l'altra gamba.

In caso servisse un contenimento maggiore, è possibile far passare entrambi i supporti imbottiti sotto entrambe le gambe.

LINEE GUIDA GENERALI

Prima di procedere con l'utilizzo, tenere presente le seguenti 8 indicazioni:

1. Verificare lo stato dell'imbragatura. Tessuto, cinghie e cuciture non devono presentare segni di usura o danneggiamento. Se presenti, non utilizzare l'imbragatura.
2. Accertarsi che il modello e la taglia dell'imbragatura siano adatte al paziente.
3. Programmare la procedura di sollevamento.
4. Inserire correttamente le asole dell'imbragatura nei ganci del bilancino del sollevatore.
5. Verificare il corretto inserimento anche con le cinghie in tensione, prima di effettuare il sollevamento.
6. Sollevare il paziente quanto basta per poterlo movimentare facilmente.
7. Verificare il corretto posizionamento dell'imbragatura.
8. Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.

Manutenzione:

Effettuare ispezione quotidiana, prima di ogni utilizzo, per verificare lo stato dell'imbragatura. Accertarsi che tessuto, cinghie e cuciture non presentino segni di usura o danneggiamento. Verificare la presenza e la leggibilità dell'etichetta presente sull'imbragatura. In caso di usura o danneggiamento di una più parti dell'imbragatura oppure in caso di mancanza o illeggibilità dell'etichetta, non utilizzare l'imbragatura.

Ispezione periodica: La normativa UNI EN ISO 10535:2007 prevede l'ispezione ogni 6 mesi.


Indicazioni di lavaggio: Consultare l'etichetta posizionata sull'imbragatura.

Non adatta a persone allergiche a poliestere e/o poliammide.

No monouso: sanificare prima di eventuale utilizzo su pazienti diversi.

Ciclo di vita:

L'imbragatura ha una durata indicativa stimata da 1 a 5 anni. La durata stimata è da considerarsi indicativa e prevede un utilizzo normale. In base alla frequenza di utilizzo, al peso sostenuto, e al tipo di lavaggio, la durata può subire sensibili variazioni.

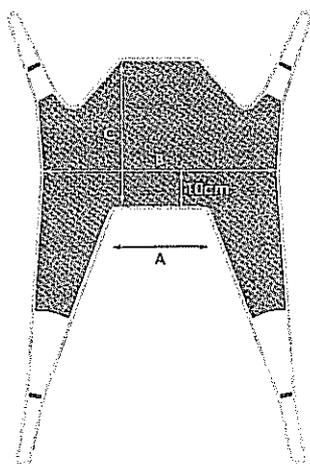

MTH-IMC

Specifiche

Materiale: poliestere e poliammide

Bordi: poliestere

Portata massima: 250 kg

Taglie disponibili: S, M, L, XL

Lavaggio: vedere etichette sull'imbragatura

Taglia	A	B	C
S - Small	30	75	63
M - Medium	36	85	63
L - Large	42	95	63
XL - Extra Large	47	102	63

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al dispositivo e relativa guida all'uso, senza preavviso, al fine di migliorarne le caratteristiche

MILTECHO S.r.l.

Via Como, 25 - 20037 Poderno Dugnano (MI)

Tel. 02 9183329 / info@miltecho.com

www.miltecho.com